

ZY SMART

IMPLANTOLOGIA ZIGOMATICA EXTRASINUSALE
BY LEADER MEDICA



IMPIANTO

ZY Smart

L'implantologia zigomatica extrasinusale, evoluzione delle prime tecniche intrasinusali che prevedono la perforazione del seno mascellare, consente oggi di semplificare la procedura chirurgica, riducendo i tempi ed i rischi intraoperatori, limitando inoltre le complicanze post operatorie per i pazienti.

Leader Medica, in collaborazione con il dr. Matteo Giorgi, ha sviluppato la sistemica **ZY Smart**, che comprende un impianto progettato per semplificare la chirurgia zigomatica ed un kit chirurgico semplice ed intuitivo. La fresa diamantata, e' disegnata per la corticotomia cilindrica ad appoggio mascellare, utile a semplificare la sequenza chirurgica di preparazione del sito.

Leader Medica mette a disposizione del medico un completo percorso formativo teorico e pratico su paziente, al fine di approcciare piu' facilmente questa pratica chirurgica, oggi sempre piu' proposta ai pazienti con severi riassorbimenti del mascellare.

(www.leadermedica/implantologia/corsi)

ZY Smart è prodotto in Titanio grado 4 puro, "cold worked".



A) Zona per ancoraggio osso mascellare L=6mm. Superficie microfilettata con passo 0.4mm e anodizzazione mimetica gialla. Consente un miglior ancoraggio, la riduzione del riassorbimento crestale e dell'accumulo di placca. Unico diametro 4.2mm con connessione esagono interno Ø 3.75 compatibile.

B) Zona ad altezza variabile con superficie macchinata. Mini invasiva con le strutture extrasinusali.

C) Zona per ancoraggio zigomatico L=18mm. Superficie doppia acidatura, Aluminium Free, con spira a doppio passo a profilo automaschiante. Consente un facile inserimento nell'osso zigomatico.



CODICE	DESCRIZIONE
Z4235	IMPIANTO ZIGOMATICO Ø 4,2 H= 35 MM
Z4237	IMPIANTO ZIGOMATICO Ø 4,2 H= 37,5 MM
Z4240	IMPIANTO ZIGOMATICO Ø 4,2 H= 40 MM
Z4242	IMPIANTO ZIGOMATICO Ø 4,2 H= 42,5 MM
Z4245	IMPIANTO ZIGOMATICO Ø 4,2 H= 45 MM
Z4247	IMPIANTO ZIGOMATICO Ø 4,2 H= 47,5 MM
Z4250	IMPIANTO ZIGOMATICO Ø 4,2 H= 50 MM
Z4252	IMPIANTO ZIGOMATICO Ø 4,2 H= 52,5 MM
Z4255	IMPIANTO ZIGOMATICO Ø 4,2 H= 55 MM
Z4260	IMPIANTO ZIGOMATICO Ø 4,2 H= 60 MM



TIS100222

Moncone in titanio per M.F.A.



MITO4560

M.F.A. angolato 45°, H=6




TIS90000 3

Transfer per M.F.A.



TIS900001

Analogo per M.F.A.

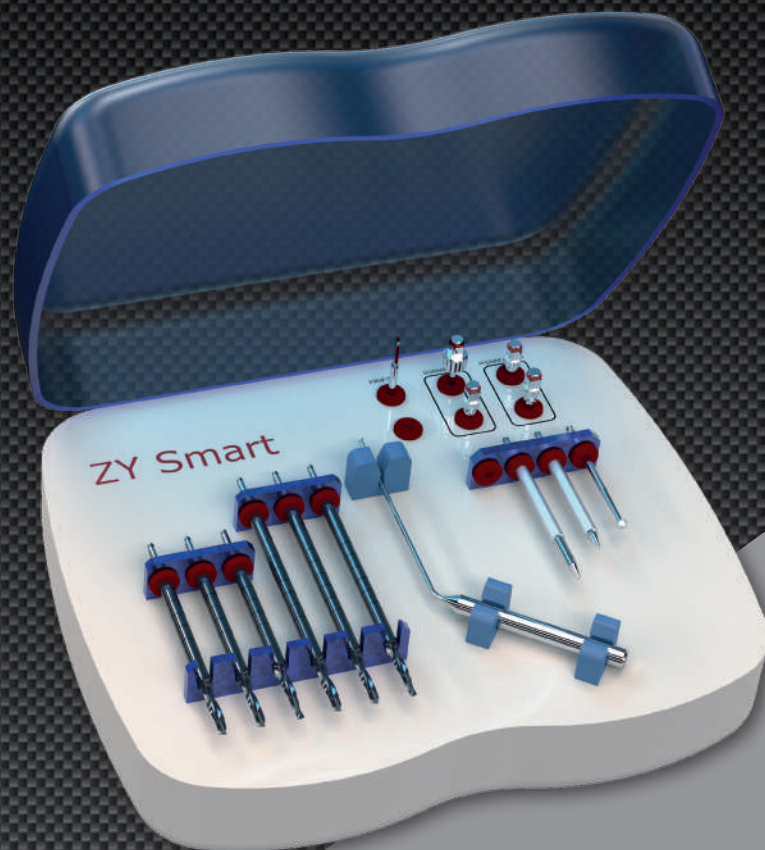

LEADER MEDICA S.R.L.

Sede legale: Via Longhin, 11
35129 Padova - Italy

Sede operativa: Via Dell'industria, 13
35030 Bastia di Rovolon (PD) - Italy

Tel. +39 049 9913364 - Fax +39 049 9910770 - e-mail: info@leadermedica.com - www.leadermedica.com

